

Cintura per sostegno addominale

INDICAZIONI

La **Cintura per sostegno addominale** è progettata come un'alternativa al tradizionale gilet di sostegno per i pazienti allettati, sulla sedia a rotelle o su altra sedia geriatrica.

Dispositivo destinato esclusivamente al posizionamento addominale. Non applicare su altre parti del corpo.

Indicato per mantenere il paziente sulla sedia e prevenire possibili cadute o scivolamenti.



COMPOSIZIONE

Strato interno-esterno: 100% Poliammide

Imbottitura: Schiuma poliuretana al 100%

Cinghie: 100% cotone

MODALITÀ D'USO

- Posizionare la cintura sull'addome del paziente. Il modello grande incorpora un sistema in velcro che permette di fissare la cintura addominale alla parte bassa della schiena del paziente.
- Incrociare le cinghie sulla parte bassa della schiena.
- Portare le cinghie fino alla parte addominale, passarle attraverso i rispettivi anelli laterali e fare un nodo di sicurezza. Riportare le cinghie sul retro.
- Annodare alla parte posteriore della sedia o alla struttura del letto.

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE	VANTAGGI	BENEFICI
Cinghie di forma a V	Permette di allungare ulteriormente dal basso e dall'alto del prodotto e dal centro	Mantiene la forma senza bisogno degli scomodi anelli
Cinghie extra resistenti	Prodotto resistente e duraturo	Aumenta la sicurezza
Realizzato con tessuto speciale	Materiale traspirante che può essere facilmente lavato.	Fresco e confortevole
Imbottitura in schiuma	Incorpora un cuscino fresco e traspirante	Comfort per il paziente
Cinghie	Extra lunghe per raggiungere la struttura a cui annodarle	Applicazione flessibile
Prodotto completamente cucito	Prodotto resistente, durevole e privo di parti mobili	Aumenta la sicurezza
Modello ampio	Incorpora un sostegno naturale senza stringere	Composizione efficace e comfort del paziente.

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

L'uso da parte di più di un paziente può provocare un'infezione crociata.
 Non usare il prodotto sulla pelle ferita.
 Non utilizzare il prodotto se è contaminato, sporco o evidentemente danneggiato.

CONSERVAZIONE E DURATA

Mantenere al riparo dalla luce solare. Tenere asciutto.
 Scadenza: 5 anni.

MISURE UNITÀ DI PRODOTTO

RIFERIMENTO	MODELLO	L (cm)	A (cm)	L CINGHIA (cm)
1070100	MEDIO	70	17	147
1070150	GRANDE	115	17	167

PRESENTAZIONE

RIFERIMENTO	UNITÀ SCATOLA	MISURE SCATOLA (cm)	PESO SCATOLA (kg)*
1070100	12 unità/scatola	31x21x23	1,35
1070150	12 unità/scatola	31x21x23	1,82

TOLLERANZA DI PESO ±10%

CONFORME A:

- Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, Direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Classe I, non sterile (secondo l'Allegato IX della Direttiva 93/42 e l'Allegato VIII del Regolamento 745/2017).
- Azienda certificata ISO 13485 e ISO 9001.
- Licenza di esercizio fabbricante di dispositivi medici n.: 3689-PS.

