

Sospensori medici

INDICAZIONI

Il **Sospensorio medico** è un dispositivo medico per l'area genitale maschile in pazienti con epididimite, idrocele, varicocele, ematocele, spermatocele o alterazioni fisiologiche locali, tra altre patologie.

Indicato per il sostegno post-chirurgico in ernie e altri interventi.



COMPOSIZIONE

Guscio 100% cotone. Fascia in poliester.

Sotto natiche in lycra. Fibbia in nylon.

MODALITÀ D'USO

- Verificare le misure del prodotto per scegliere la propria.
- Indossarlo come uno slip e sollevarlo fino a quando l'elastico raggiunge l'altezza della vita in modo che sostenga comodamente i genitali.
- Tirare la cinghia attraverso la fibbia fino a quando il sospensorio è ben fissato.
- Separare le cinghie sotto le natiche a sinistra e a destra, posizionandole nella zona dell'inguine.
- Tagliare l'estremità in eccesso se necessario.

CARATTERISTICHE

Cinghia molto lunga per un fissaggio ottimale.

Il guscio in cotone previene lo sfregamento ed evita l'umidità.

Grande vestibilità nelle taglie 13 e 14.

Facile da lavare.

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

L'uso da parte di più di un paziente può provocare un'infezione crociata.

Non usare il prodotto sulla pelle ferita.

Non utilizzare il prodotto se è contaminato, sporco o evidentemente danneggiato.

CONSERVAZIONE E DURATA

Mantenere al riparo dalla luce solare. Tenere asciutto. Scadenza: 5 anni.

MISURE UNITÀ DI PRODOTTO

È importante misurare la lunghezza e la larghezza del guscio per scegliere la misura giusta. Bisogna ricordare che un indumento largo può ridurre l'efficacia terapeutica del prodotto e uno troppo stretto può avere un'influenza negativa sulla circolazione del sangue o su altre patologie diverse da quelle che intendiamo trattare.

RIFERIMENTO	MODELLO	CIRCONFERENZA VITA (cm)	L guscio (cm)	A guscio (cm)
1070811	T1	117	10,6	10
1070812	T2	117	11,25	10,5
1070813	T3	117	12	11
1070814	T4	117	12,75	11,5
1070815	T5	117	13,75	12
1070816	T6	117	14,5	13
1070817	T7	117	15	13,5
1070818	T8	117	15,75	14,50
1070819	T9	117	16,5	15
1070820	T10	150	17,75	15,75
1070821	T11	150	18,5	16,75
1070822	T12	150	19,5	17,25
1070823	T13	150	20,5	17,75
1070824	T14	150	21,5	18,75

PRESENTAZIONE			
RIFERIMENTO	UNITÀ SCATOLA	MISURE SCATOLA (cm)	PESO SCATOLA* (kg)
1070811-822	10 unità/scatola	18x17x9	0,6

*TOLLERANZE: Peso ± 0,1 kg

CONFORME A:

- Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, Direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Classe I, non sterile (secondo l'Allegato IX della Direttiva 93/42 e l'Allegato VIII del Regolamento 745/2017).
- Azienda certificata ISO 13485 e ISO 9001.
- Licenza di esercizio fabbricante di dispositivi medici n.: 3689-PS.

