

## Tutore per gomito-tallone

### INDICAZIONI

Il **Tutore per gomito-tallone** è un dispositivo medico usato per prevenire le piaghe da decubito nei pazienti che devono rimanere a letto o su una sedia per molto tempo. Può anche essere usato per tenere la medicazione in posizione.



### COMPOSIZIONE

Prodotto composto da poliestere a livello dello strato esterno e interno, così come l'imbottitura. Le cinghie di sostegno sono in poliammide.

### MODALITÀ D'USO

- Aprire il tutore per gomito e tallone.
- Posizionare il tutore alla base del gomito o del tallone in modo che il suo punto di pressione coincida con il rinforzo interno.
- Regolare la cinghia o le cinghie mediante il velcro incorporato

### CARATTERISTICHE GENERALI

CARATTERISTICHE	VANTAGGI	BENEFICI
Design anatomico	Assicura una perfetta aderenza sia al gomito che al tallone. Impedisce al tutore di ruotare o muoversi.	È posizionato direttamente sotto il punto di pressione del gomito/tallone, rendendolo molto comodo per il paziente. Permette di ridurre i costi d'uso e inventario.
Cuscino a tre strati	Presenta una piccola elevazione per il punto di pressione gomito/tallone.	Morbidezza e comfort per il paziente.
Sistema di sostegno in velcro	Regolabile. Sicuro.	Regolazione flessibile. Immobilizzazione sicura.
Uso individuale	Terapia individualizzata.	Elimina il rischio di contaminazione crociata.
Cintura larga	Regolazione della protezione al paziente, evitando la rotazione.	Morbido e leggero. Comfort e sicurezza.
Uso	Facile da applicare, bassa manutenzione.	Risparmio di tempo per il personale infermieristico e di assistenza.

### CARATTERISTICHE SPECIALI

RIFERIMENTO	CARATTERISTICA
1080210	Zona interna di rinforzo nella zona del gomito o del tallone
1080210B	Estensione con cinghia per un doppio fissaggio e zona di massima protezione.

### AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

L'uso da parte di più di un paziente può provocare un'infezione crociata. Non usare il prodotto sulla pelle ferita.  
Non utilizzare il prodotto se è contaminato, sporco o evidentemente danneggiato.

### CONSERVAZIONE E DURATA

Mantenere al riparo dalla luce solare. Tenere asciutto. Scadenza: 5 anni.

### MISURE UNITÀ DI PRODOTTO

RIFERIMENTO	MODELLO	Lunghezza	Larghezza	Lunghezza Cinghia	Larghezza - Cinghia	Superf. Rinforzo
1080200	Standard	21 cm	27 cm	28 cm	5 cm	-
1080210	Rinforzato	21 cm	27 cm	28 cm	5 cm	18 x 15 cm
1080210B	Doppio fissaggio	21 cm	27 cm	28 cm	5 cm	18 x 15 cm

### PRESENTAZIONE

RIFERIMENTO	UNITÀ SCATOLA	MISURE SCATOLA (cm)	PESO SCATOLA (kg)
1080200	36 unità/scatola	31x21x31	1,2
1080210		31x21x31	1,43
1080210B		38x21x35	1,75

### CONFORME A:

- Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, Direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Classe I, non sterile (secondo l'Allegato IX della Direttiva 93/42 e l'Allegato VIII del Regolamento 745/2017).
- Azienda certificata ISO 13485 e ISO 9001.
- Licenza di esercizio fabbricante di dispositivi medici n.: 3689-PS.

