

Tutor per gomito-tallone aperto

INDICAZIONI



Il **Tutore per gomito-tallone aperto** è un dispositivo medico usato per prevenire le piaghe da decubito nei pazienti che devono rimanere a letto o su una sedia per molto tempo. Può anche essere usato per tenere la medicazione in posizione.

COMPOSIZIONE

Prodotto composto da poliestere a livello dello strato esterno e interno, così come l'imbottitura. Le cinghie di sostegno sono in poliammide.

MODALITÀ D'USO

- Aprire il tutore per gomito e tallone.
- Posizionare il tutore alla base del gomito o del tallone in modo che il suo punto di pressione coincida con il rinforzo interno.
- Regolare la cinghia o le cinghie mediante il velcro incorporato

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE	VANTAGGI	BENEFICI
Design anatomico	Assicura una perfetta aderenza sia al gomito che al tallone. Impedisce al tutore di ruotare o muoversi.	È posizionato direttamente sotto il punto di pressione del gomito/tallone, rendendolo molto comodo per il paziente. Permette di ridurre i costi d'uso e inventario.
Cuscino a tre strati	Presenta una piccola elevazione per il punto di pressione gomito/tallone.	Morbidezza e comfort per il paziente.
Sistema di sostegno in velcro	Regolabile. Sicuro.	Regolazione flessibile. Immobilizzazione sicura.
Uso individuale	Terapia individualizzata.	Elimina il rischio di contaminazione crociata.
Cintura larga	Regolazione della protezione al paziente, evitando la rotazione.	Morbido e leggero. Comfort e sicurezza.
Uso	Facile da applicare, bassa manutenzione.	Applicazione rapida da parte del personale infermieristico e di assistenza.

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

L'uso da parte di più di un paziente può provocare un'infezione crociata.
 Non usare il prodotto sulla pelle ferita.
 Non utilizzare il prodotto se è contaminato, sporco o evidentemente danneggiato.

CONSERVAZIONE E DURATA

Mantenere al riparo dalla luce solare. Tenere asciutto. Scadenza: 5 anni.

MISURE UNITÀ DI PRODOTTO

RIFERIMENTO	MODELLO	Lunghezza	Larghezza	Lunghezza - Cinghia	Larghezza - Cinghia
1080280	Lunghezza	43 cm	23 cm	28 cm	11 cm
1080290	Corto	28 cm	23 cm	25 cm	4 cm

PRESENTAZIONE			
RIFERIMENTO	UNITÀ SCATOLA	MISURE SCATOLA (cm)	PESO SCATOLA (kg)*
1080280	20 unità/scatola	40x25x40	1,93
1080290	40 unità/scatola	38x21x35	1,5

CONFORME A:

- Regolamento (UE) 2017/745 sui dispositivi medici
- Classe I, non sterile (Allegato VIII del Regolamento 2017/745)
- Azienda certificata ISO 13485 e ISO 9001
- Licenza di esercizio fabbricante di dispositivo medici n.:3689-PS

