

Immobilizzatore per arti pediatrico-neonatale

INDICAZIONI

L'Immobilizzatore per arti pediatrico-neonatale è un dispositivo medico che viene utilizzato per immobilizzare arti di pazienti neonatali quando viene richiesta un'immobilizzazione media e sicura.

Dotato di un morbido cuscinetto con lunghe fasce di sostegno.




COMPOSIZIONE

Prodotto realizzato in materiale a tre strati, con interno in cotone, esterno in poliammide e imbottitura in schiuma di poliuretano, con cinghie in poliestere.

MODALITÀ D'USO

- Regolare l'immobilizzatore e posizionarlo intorno al polso o alla caviglia.
- Regolare l'immobilizzatore mediante il sistema in velcro e legare le cinghie alla struttura, preferibilmente metallica, del letto o simile, in modo tale che

l'immobilizzatore sia teso.

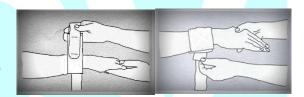

CARATTERISTICHE

Morbidezza e comfort grazie all'imbottitura più spessa. Alta resistenza, non blocca la circolazione. Traspirante, previene l'irritazione della pelle, il surriscaldamento, l'umidità e la macerazione.

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

L'uso da parte di più di un paziente può provocare un'infezione crociata.

Non usare il prodotto sulla pelle ferita.

Non utilizzare il prodotto se è contaminato, sporco o evidentemente danneggiato.

CONSERVAZIONE E DURATA

Mantenere al riparo dalla luce solare. Tenere asciutto.

Scadenza: 5 anni.

Rev.01 28/03/2023 PAGINA. 1 / 2



MISURE UNITÀ DI PRODOTTO

Design anatomico, adattabile al paziente. Può essere utilizzato indistintamente su polso o caviglia:

RIFERIMENTO	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	
	(cm)	(GIII)	
1090150	168	3	

I	PRESENTAZIONE	IE			
	RIFERIMENTO	UNITÀ SCATOLA	MISURE SCATOLA	PESO SCATOLA	
			(cm)	(kg)	
	1090150	120 unità/scatola	30*22*15	1,15	

CONFORME A:

- Regolamento (UE) 2017/745 sui dispositive medici
- Classe I, non sterile (Allegato VIII del Regolamento 2017/745)
- Azienda certificata ISO 13485 e ISO 9001
- Licenza di esercizio fabbricante di dispositivo medici n.:3689-PS

SGS SGS





 $\textbf{C.V. MEDICA SL} \cdot \text{C/ Ponent}, \ 1 \ \ \text{Pol. Ind. La Plana} \cdot 43424 \ \ \text{Sarral - Tarragona - Spagna} \cdot \text{T.+34 977 890 598}$

www.cvmedica.com