

Dispomedic P Scrub

SPAZZOLINO/SPUGNA con iodopovidone per il lavaggio e l'antisepsi della pelle

DESCRIZIONE:

Spazzolino/Spugna con **iodopovidone 7,5%** indicato per il lavaggio e l'antisepsi delle mani del personale tecnico-sanitario. Monouso, lavaggio antiseptico. Lavaggio delle mani in aree ad alto rischio.

COMPOSIZIONE:

SPAZZOLINO: Polietilene SPUGNA: 100% schiuma di poliuretano ANTISETTICO: Iodopovidone al 7,5%, eccipienti q.s.p. 100% (circa 20 ml) NETTAUNGHIE*: copolimero ABS (acrilonitrile butadiene stirene)



MODALITÀ D'USO

Lavare le mani con acqua, rimuovere lo spazzolino dalla confezione usando la facile apertura situata ad un'estremità del contenitore. Applicare l'antiseptico per 3-5 minuti strofinando con lo spazzolino e la spugna, insistendo sulle zone tra le dita e sulle unghie. Usare il dispositivo nettaunghie* e poi risciacquare e asciugare con asciugamani monouso o aria calda.

AVVERTENZE

Solo per uso esterno. Evitare il contatto con occhi, mucose e zone sensibili della pelle. Irritante per gli occhi e leggermente irritante per la pelle. Possibile ipersensibilità a contatto con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua. Usare con cautela nei bambini sotto i 2 anni di età. Non utilizzare in persone sensibili ai componenti o per un periodo di tempo prolungato. Non usare con derivati del mercurio. Non usare nei neonati, nelle donne nel periodo perinatale o durante il periodo di allattamento. Non usare in persone con disturbi alla tiroide. In caso di intossicazione o ingestione accidentale, chiamare il Servizio di Informazione Tossicologica al numero di telefono: 91 562 04 20.

CARATTERISTICHE:

Spazzolino con setole integrate a una spugna morbida. Design anatomico per un maggiore comfort e flessibilità per l'utente. Può contenere un dispositivo di pulizia delle unghie per favorire la pulizia.

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE

Aspetto: liquido Colore: MARRONE Densità: 1,04 ± 0,035 g/ml

MISURA DEL PRODOTTO UNITARIO:

80x50x37 cm ± 2,5 mm

PRESENTAZIONE				
RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	UNITÀ/SCATOLA	MISURE SCATOLA (cm)	PESO SCATOLA** (kg)
0030210	DISPOMEDIC P SCRUB	100	38x21x35 Scatola con apertura laterale	3,5
0030210B	DISPOMEDIC P SCRUB *con nettaunghie	100	38x21x35 Scatola con apertura laterale	3,5
0030210C	DISPOMEDIC P SCRUB	450	60x39,5x50,5 15 dispenser da 30 unità.	18
0030210D	DISPOMEDIC P SCRUB *con nettaunghie	450	60x39,5x50,5 15 dispenser da 30 unità.	18

** TOLLERANZE: Peso ± 0,5 kg

CONFORME A:

REGOLAMENTO (UE) N. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato e all'uso dei biocidi

EN ISO 12791:2005 Antisettici e disinfettanti chimici. Disinfezione chirurgica delle mani. Requisiti e metodi di test (fase 2/stage 2).

UNE-EN 13624:2014 Antisettici e disinfettanti chimici. Test quantitativo in sospensione per la valutazione dell'attività fungicida o levuricida in medicina. Metodo di test e requisiti (fase 2, stage 1).

UNE-EN 1650:2008 Antisettici e disinfettanti chimici. Test quantitativo in sospensione per la valutazione dell'attività fungicida o levuricida di antisettici e disinfettanti chimici utilizzati in ambito alimentare, industriale, domestico e istituzionale. Metodo di test e requisiti (fase 2, stage 1).

UNE-EN 1499:1997 Antisettici e disinfettanti chimici. Lavaggio igienico delle mani. Metodo di test e requisiti (fase 2, stage 2).

UNE-EN 13727:2012+A1 Antisettici e disinfettanti chimici. Test quantitativo in sospensione per la valutazione dell'attività battericida in ambito medico. Metodo di test e requisiti (fase 2, stage 1).

Azienda certificata **ISO 9001**.

N. REG. AEMPS: 872-DES

