

Dispomedic mask KIDS Mascherina monouso per bambini

Con banda elastica, 3 strati



CARATTERISTICHE

Mascherina rettangolare per bambini, blu, a 3 strati, con strato interno con filtro antibatterico, in tessuto non tessuto, senza particelle, traspirante. Con pieghe per una migliore vestibilità anatomica.

Confezionata individualmente.

Tipo I, non sterile. Misure: 145 x 95 mm (± 5 mm)

Ha una striscia interna di regolazione per il naso in materiale modellabile adattabile e resistente di circa 9,5 cm. Strato interno comodo, che non irrita la pelle.

Elastici arrotondati. Efficienza di filtrazione batterica


≥95% Resistenza alla respirazione ≤40,0 Pa/cm²

Pulizia microbica ≤ 30 cfu/g

Confezionata in scatola dispenser da 50 unità. Senza lattice.

Conformità alla norma une-en 14683: 2019+ac

MODALITÀ D'USO

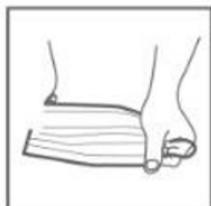

1. Posizionare la mascherina con il lato colorato rivolto verso l'esterno e la clip per il naso rivolta verso l'alto.



2. Tirare gli elastici e posizionarli dietro entrambe le orecchie.



3. Premere la clip del naso il più strettamente possibile, tirare e aprire la mascherina verso il basso per coprire completamente la bocca e il naso.

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

L'uso da parte di più di un paziente può provocare un'infezione crociata. Non usare il prodotto sulla pelle ferita. Non utilizzare il prodotto se è contaminato, sporco o evidentemente danneggiato.

CONSERVAZIONE E DURATA

Mantenere al riparo dalla luce solare. Tenere asciutto. Scadenza: 3 anni.

PRESENTAZIONE

RIFERIMENTO	UNITÀ SCATOLA	MISURE SCATOLA (cm)	PESO SCATOLA (kg)*
9000110	2.000 unità (50 unità/scatola dispenser 40 scatole dispenser/scatola)	Scatola dispenser 17,5x10x10 Scatola 53x37x42	9,4

TOLLERANZA DI PESO $\pm 10\%$

CONFORME A:

- Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, Direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo.
- Classe I, non sterile (secondo l'Allegato IX della Direttiva 93/42/CEE)
- UNE-EN 14683:2019+AC:2019 Mascherine chirurgiche. Requisiti e metodi di test.
- Azienda certificata ISO 13485 e ISO 9001.
- Licenza di esercizio dell'importatore di dispositivi medici n.: 3689-PS

