

Dispomedic mask. Mascherina chirurgica monouso

Con banda elastica, 3 strati



CARATTERISTICHE

Mascherina chirurgica rettangolare, a 3 strati, con strato interno con filtro antibatterico, in tessuto non tessuto, senza particelle, traspirante. Con pieghe per una migliore vestibilità anatomica.

Tipo IIR, non sterile. Misure: 175 x 95 mm (± 5 mm)

Ha una striscia interna di regolazione per il naso in materiale modellabile, adattabile e resistente di circa 9,5 cm. Strato interno comodo, che non irrita la pelle
Elastici arrotondati.

Efficienza di filtrazione batterica ≥98%

Resistenza alla respirazione ≤60,0 Pa/cm²


Resistenza agli spruzzi ≥ 16 kpa

Pulizia microbica ≤ 30 cfu/g

Confezionata in scatola dispenser. Senza lattice

Conformità alla norma une-en 14683: 2019+ac

MODALITÀ D'USO

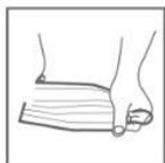

1. Posizionare la mascherina con il lato colorato rivolto verso l'esterno e la clip per il naso rivolta verso l'alto.



3. Premere la clip del naso il più strettamente possibile, tirare e aprire la mascherina verso il basso per coprire completamente la bocca e il naso.



2. Tirare gli elastici e posizionarli dietro entrambe le orecchie.

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

L'uso da parte di più di un paziente può provocare un'infezione crociata. Non usare il prodotto sulla pelle ferita.
 Non utilizzare il prodotto se è contaminato, sporco o evidentemente danneggiato.

CONSERVAZIONE E DURATA

Mantenere al riparo dalla luce solare. Tenere asciutto.
 Scadenza: 3 anni.

PRESENTAZIONE			
RIFERIMENTO	UNITÀ SCATOLA	MISURE SCATOLA (cm)	PESO SCATOLA (kg)*
9000110	2.000 unità (50 unità/scatola dispenser 40 scatole dispenser/scatola)	Scatola dispenser 18,5x10x8 Scatola 50x39x34	8,5

TOLLERANZA DI PESO ±10%

CONFORME A:

- Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, Direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo.
- Classe I, non sterile (secondo l'Allegato IX della Direttiva 93/42/CEE)
- UNE-EN 14683:2019+AC:2019 Mascherine chirurgiche. Requisiti e metodi di test.
- Azienda certificata ISO 13485 e ISO 9001.
- Licenza di esercizio dell'importatore di dispositivi medici n.: 3689-PS

