

Ginocchiera per tavolo da parto

INDICAZIONI

La **Ginocchiera per tavolo da parto** previene le lesioni alla parte posteriore della pelle del ginocchio a contatto con la staffa del tavolo ostetrico.

COMPOSIZIONE

Parte superiore: viscosa - traspirante
Parte inferiore: Polipropilene - impermeabile ai fluidi.
Imbottitura interna: Poliestere - Imbottitura sintetica ad alta densità; Antiallergico e antimuffa.
Cinghie: poliestere non tessuto



MODALITÀ D'USO

- Aprire le cinghie della protezione e posizionare la gamba del paziente in modo che la parte posteriore del ginocchio poggi al centro dell'articolazione. Posizionare il lato di tessuto di viscosa verso l'alto.
- Portare le cinghie sopra la gamba del paziente e fissarle alle linguette di velcro.
- Smaltire dopo l'uso.

CARATTERISTICHE

Fornire la massima protezione durante la procedura ostetrica. Materiale traspirabile a contatto con la pelle.

Fibra di poliestere leggera, fresca e traspirante per il massimo comfort del paziente. Molto facile da regolare con il sistema in velcro.

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

L'uso da parte di più di un paziente può provocare un'infezione crociata. Non usare il prodotto sulla pelle ferita.

Non utilizzare il prodotto se è contaminato, sporco o evidentemente danneggiato.

CONSERVAZIONE E DURATA

Mantenere al riparo dalla luce solare. Tenere asciutto.

Scadenza: 5 anni.

MISURE UNITÀ DI PRODOTTO

RIFERIMENTO	MODELLO	L (cm)	A (cm)
1040400	STANDARD	41	43

PRESENTAZIONE			
RIFERIMENTO	UNITÀ SCATOLA	MISURE SCATOLA (cm)	PESO SCATOLA (kg)*
1040400	12 unità/scatola	55x40,5x27	2,2

TOLLERANZA DI PESO ±10%

CONFORME A:

- Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, Direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Classe I, non sterile (secondo l'Allegato IX della Direttiva 93/42 e l'Allegato VIII del Regolamento 745/2017).
- Azienda certificata ISO 13485 e ISO 9001.
- Licenza di esercizio fabbricante di dispositivi medici n.: 3689-PS.

