

## Materasso antidecubito

### INDICAZIONI

Il **Materasso antidecubito** è un dispositivo medico utilizzato per la prevenzione delle piaghe da decubito nei pazienti che devono rimanere a letto o sul tavolo operatorio per molto tempo.

Inoltre, il cuscino può essere riposto in una custodia impermeabile per evitare danni da fuoriuscite di liquidi.



### COMPOSIZIONE

Il materasso è realizzato in 100% cotone ignifugo con un'imbottitura in fibra di poliestere siliconata.

La custodia è realizzata in tessuto impermeabile 100% poliammide.

### MODALITÀ D'USO

- Estrarre il materasso dalla custodia e afferrarlo sempre da un lato.
- Inserire il materasso nella custodia impermeabile corrispondente.
- Posizionare il materasso sul letto o sul tavolo operatorio corrispondente.

### CARATTERISTICHE

L'imbottitura in fibra di poliestere siliconata permette un recupero e una reazione immediata a qualsiasi pressione applicata, ottenendo una distribuzione ottimale del peso.

Il suo peso ridotto lo rende molto facile da usare e trasportare.

L'insieme di fibre fornisce una ventilazione costante, impedendo l'accumulo e l'assorbimento di umidità.

Questo materasso può sostenere un peso di 120 kg e la scala di protezione è moderata.

Il materiale della custodia traspirante è dotato di micropori che permettono la traspirazione pur offrendo un'impermeabilità assoluta.

Lavare a mano in acqua fredda e con prodotti non abrasivi. Dopo il lavaggio, lasciare asciugare in posizione orizzontale.

### AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

L'uso da parte di più di un paziente può provocare un'infezione crociata. Non usare il prodotto sulla pelle ferita.

Non utilizzare il prodotto se è contaminato, sporco o evidentemente danneggiato.

### CONSERVAZIONE E DURATA

Mantenere al riparo dalla luce solare.

Tenere asciutto. Scadenza: 5 anni.

**MISURE UNITÀ DI PRODOTTO**

RIFERIMENTO	MODELLO	L (cm)	A (cm)
5022105	MATERASSO TRAPUNTATO	200	84
5022107	MATERASSO TUBOLARE	200	84
5022205	CUSTODIA IMPERMEABILE	200	84

**PRESENTAZIONE**

RIFERIMENTO	UNITÀ CUSTODIA	MISURE SCATOLA (cm)	PESO SCATOLA (kg)
5022105	1 unità/custodia	76,5x62x46,5	7,3
5022107	1 unità/custodia	76,5x62x46,5	12,8
5022205	1 unità/custodia	-	-

TOLLERANZA DI PESO ±10%

**CONFORME A:**

- Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, Direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Classe I, non sterile (secondo l'Allegato IX della Direttiva 93/42 e l'Allegato VIII del Regolamento 745/2017).
- Azienda certificata ISO 13485 e ISO 9001.
- Licenza di esercizio fabbricante di dispositivi medici n.: 3689-PS.



Sistema de Gestión  
ISO 9001:2015  
ISO 22718:2007  
www.tuv.com  
ID 9106078921