

Cintura di Sostegno Perineale Comfort

Prodotto infermieristico

INDICAZIONI

La cintura di sostegno perineale Comfort è progettata come alternativa al tradizionale gilet di contenzione per i pazienti in carrozzina.

Dispositivo destinato esclusivamente al posizionamento pelvico-addominale. Non applicare su nessun'altra parte del corpo.

Indicato per mantenere il paziente stabile sulla carrozzina ed evitare possibili cadute o scivolamenti.

COMPOSIZIONE

Strato interno-esterno: 100% poliammide

Riempimento: Schiuma 100% poliuretano

Cinghie: 100% cotone



MODALITÀ DI UTILIZZO

- Posizionare il prodotto sulla sedia a rotelle in modo che la parte più stretta della cintura (parte inferiore) sia rivolta verso lo schienale della sedia.
- Far passare le cinghie dalla parte inferiore della cintura verso la parte posteriore della sedia e fissarle con la chiusura.
- Far sedere il paziente sopra il dispositivo. Posizionare la parte superiore della cintura sull'addome.
- Portare le cinghie superiori verso lo schienale della sedia, fissare la chiusura in plastica e tendere le cinghie fino a quando il paziente non è ben assicurato.

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE	VANTAGGI	BENEFICI
Design confortevole	Consente la contenzione del paziente evitando sfregamenti nella zona perineale.	Vestibilità regolabile per adattarsi alla morfologia del paziente
Realizzato con tessuto speciale lavabile a 30°C	Consente la circolazione dell'aria	Fresco e comodo
Riempimento in schiuma	Include un cuscino fresco e traspirante	Comfort per il paziente
Cinghie extra forti	Conferisce robustezza e durata al prodotto	Aumenta la sicurezza
Cinghie	Extra lunghe per raggiungere la struttura a cui allacciarle	Flessibilità nell'applicazione
Prodotto completamente cucito	Conferisce robustezza al prodotto, resistenza e non contiene parti mobili	Aumenta la sicurezza

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

L'uso da parte di più di un paziente può portare a infezioni incrociate.
 Non utilizzare il prodotto su pelle che presenta lesioni.
 Non utilizzare il prodotto se è contaminato, sporco o evidentemente deteriorato.

STOCCAGGIO E DURATA DI VITA UTILE

Tenere al riparo dalla luce del sole. Mantenere asciutto.
 Scadenza: 5 anni.

MISURE DELL'UNITÀ DI PRODOTTO

ARTICOLO	MODELLO	L (cm)	A (cm)	L CINGHIA (cm)
1070210	STANDARD	49	42	96(x2)+80(x2)

PRESENTAZIONE			
ARTICOLO	PEZZI PER SCATOLA	MISURE SCATOLA (cm)	PESO SCATOLA (kg)*
1070210	12 pezzi/scatola	31x21x23	1.66

TOLLERANZA DI PESO $\pm 10\%$

CONFORME A:

- Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui dispositivi medici.
- Classe I, non sterile (ai sensi dell'Allegato VIII del Regolamento 745/2017).
- Azienda certificata ISO 13485 e ISO 9001.
- Licenza operativa del produttore di dispositivi medici n.: 3689-PS.



Sistema de Gestión
 ISO 9001:2015
 ISO 22716:2007
 www.tuv.com
 ID 9105078921